

Werkwijze Spotchem EZ




Spotchem EZ:
droge chemie



1. Bloedprikken.



2. EZ buisje vullen tot de streep.

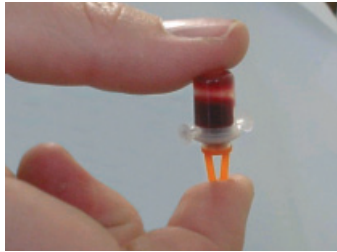


3. Direct minimaal 10X zwenken (250 μ L)
(let op dat de luchtbel op en neer gaat).




4. Openen door op '1' te drukken.



5. Centrifuge deksel verwijderen.

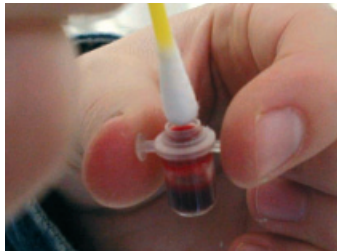

6. Dopje verwijderen en rand schoonmaken met wattenstaafje.

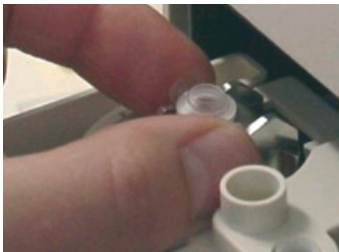

7. EZ buisje plaatsen.



8. EZ tijpje plaatsen.



9. Centrifugedeksel plaatsen.



10. Strips plaatsen.



11. Op 'START' drukken.



12. Als de Spotchem EZ klaar is altijd de strips controleren.

Spotchem EL:
electrolyten



Werkwijze Spotchem EL



1. Start door op '1' te drukken.



2. Open de E-plate zonder de contactpunten aan te raken.



3. Plaats de E-plate zonder de contactpunten aan te raken.



4. Plaats 2 schone pipettips op de dual pipet en zuig met de blauwe knop de referentievloestof op.



5. Zuig met de gele knop het monster op.



6. Plaats de pipet in het toestel.




7. Let op dat de pipetpuntjes boven de groene gaatjes staan.




8. Pipetteer door beide knoppen geheel in te drukken.



9. Verwijder de pipet met de knoppen ingedrukt.

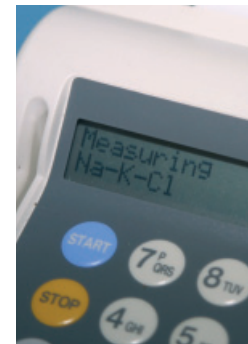

10. De meting start automatisch.

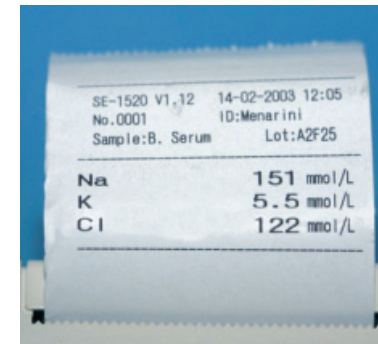

11. Na 1 minuut verschijnt het resultaat.